



Sugclean⁺

Ácido fosfórico 13,6%

DETERGENTE PROFISSIONAL
DESINCROSTANTE ÁCIDO



NÃO FORMA ESPUMA • DETERGENTE CONCENTRADO •
DISSOLVE MATERIAL ORGÂNICO E DEBRIS SÓLIDOS DEPOSITADOS NAS
MANGUEIRAS E NOS SEPARADORES DE DETRITOS • PREVINE ENTUPIMENTOS •
LIMPA SEM RESSECAR • MELHORA A SUÇÃO PELA DESOBSTRUÇÃO DOS DUTOS

**PERIGO: PROVOCA QUEIMADURA SEVERA
À PELE E DANO AOS OLHOS.**



**PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO**

Conteúdo líquido
1 Litro

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Modo de usar: Adicione 30 mL de **SUGCLEAN** em 1 Litro de água. Aspire a solução com a máxima potência dos sugadores e hemossuctores e também jogue o líquido na unidade auxiliar. Aspire 1 Litro em cada limpeza do consultório diariamente. Para iniciar a limpeza com **SUGCLEAN**, sugerimos adicionar 60 mL do produto concentrado em 1 Litro de água durante os primeiros 5 dias, a fim de remover resíduos acumulados.

Para melhores resultados: Use diariamente. **SUGCLEAN** dissolve debris sólidos nos tubos e no filtro do sifão da cadeira. Caso haja entupimento, use 60 mL de **SUGCLEAN** para cada 1 Litro de água.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Precauções: EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA - O número do disque-intoxicação 0800 722 6001.

Contém ÁCIDO FOSFÓRICO.

Não misture com água na embalagem original; Não aplique em superfície aquecida; Nunca reutilize a embalagem vazia.

Composição: Princípio Ativo: Ácido Fosfórico 13,6%. Excipientes: Álcool Isopropílico, Água, Emulsificante, Sequestrante, Acidulante, Corante e Espessante.

ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.



Fabricado por: RZK Química do Brasil Ltda.
Estrada Santa Maria, 2.541 - Campo Grande - Rio de Janeiro - CNPJ 01.808.863/0001-52
Indústria Brasileira - Químico responsável: Cristiane Barbosa Pereira CRQ III 03424005
Autorização de Funcionamento: 3.02.039-4 - Registro MS Nº: 3.2039.0081

Distribuído exclusivamente por:



Estrada do Guereguê, 2059 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP 22713-002 - CNPJ 33.112.665/0001-46
SAC: 0800 602 68 80 - Fax: 21-3342-4009 - www.dfl.com.br - sac@dfl.com.br - Indústria Brasileira
Farm. Resp.: Renata Caroline CRF-RJ Nº 21674